

ELOFLEX L2

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
OHJEKIRJA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX


VELKOMMEN TIL DIN ELOFLEX

Tak, fordi du har valgt Eloflex som din el-kørestol. Vi er glade for, at du har valgt Eloflex, da vores mission er at forenkle hverdagen og øge friheden for mennesker med mobilitetsudfordringer. Vi håber, at din Eloflex giver dig mulighed for at nyde begge fordele.

At bruge din nye el-kørestol skal være en givende oplevelse. Denne manual indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Vi anbefaler kraftigt, at du læser hele dokumentet igennem, før du bruger din Eloflex for første gang. Det er også tilrådeligt at øve dig i at betjene din Eloflex i et roligt, åbent og plant område, før du bevæger dig ud i andre miljøer.

Vi er her for at støtte dig, når du begynder at bruge din Eloflex. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

**Held og lykke og stor glæde med din Eloflex.
Kør forsigtigt!**

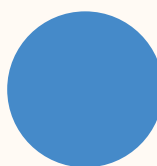

INDHOLD

Tilsigtet brug	3	Låsemekanisme / Tipsikring / Manuel kørsel	11
Udfoldning og foldning	4	Sikkerhedssele / Transport og opbevaring	12
Opladning	5	Kørsel	13
Monter joysticket / Folde joysticket ned	6	Sikkerhedsinstruktioner ved kørsel / Sikkerhed	14
Brug af joysticket	7	Generelle sikkerhedsanvisninger	15
Fodstøtte	8	Tekniske specifikationer	16
Armlæn / Ryglæn	9		
Juster ryglænet	10		

TILSIGTET BRUG

Klassificering og tilsigtet brug

Eloflex el-kørestole er udviklet til personer, der har svært ved at gå eller slet ikke kan gå, men som har synet og de fysiske og mentale evner til at styre en el-kørestol.

Eloflex el-kørestolen er tilstrækkelig kompakt og fleksibel til indendørs brug, men den er også velegnet til udendørs brug. Kapitlet "Tekniske data" bagest i dette dokument indeholder oplysninger om hastighed, venderadius, rækkevidde, maksimal lasteevne, maksimal brugervægt osv.

Denne elektriske kørestol er testet i henhold til EN12184:2022 og klassificeret som klasse B (til indendørs og udendørs brug). Eloflex er også godkendt i henhold til ISO 7176, IEC 60601, og batterierne er godkendt i henhold til UN38.3.

Eloflex el-kørestole opfylder de gældende krav i MDR 2017/745.

Eloflex-el-kørestole er klassificeret som medicinsk udstyr i klasse I i henhold til forordning (EU) 2017/745 (MDR). Produkterne er CE-mærkede på baggrund af producentens overensstemmelsesvurdering og tekniske dokumentation i overensstemmelse med de gældende krav i MDR. Procedure for overensstemmelsesvurdering: Bilag II og bilag III til MDR 2017/745. Producenten kan ikke garantere fortsat overensstemmelse med gældende krav, hvis der anvendes ikke-godkendte dele eller tilbehør.

Indikationer for anvendelse

Formålet med en Eloflex el-kørestol er at kompensere for en skade eller et handicap, og den anbefales under følgende omstændigheder:

- Hvis brugeren er ude af stand til at gå eller har meget begrænset evne til at gå, hvilket gør det vanskeligt at bevæge sig i sit eget hjem.
- Hvis der er behov for at forlade hjemmet for at gå ud eller besøge steder, der regelmæssigt besøges i hverdagen.
- Når brugeren har svært ved at få adgang til arbejde, uddannelse, sociale aktiviteter eller dagligdags aktiviteter på grund af nedsat mobilitet.

Det anbefales at bruge Eloflex el-kørestole både indendørs og udendørs, hvis det ikke er muligt at bruge manuelle kørestole på grund af mobilitetsproblemer, men det stadig er muligt at håndtere el-kørestole korrekt.

Medfølgende tilbehør

Oplader, reflekser og en taske med enkle værktøjer findes i opbevaringstasken ved levering.

Før brug

Brug kun Eloflex el-kørestolen, når den er fuldt funktionsdygtig, ellers udsætter du dig selv og andre for fare. Den følgende liste omfatter ikke alle mulige situationer, men beskriver visse forhold, der kan påvirke el-kørestolens anvendelighed:

- Brug ikke el-kørestolen, hvis batterierne er defekte eller deformere.
- Brug ikke el-kørestolen, hvis motoren rykker eller laver unormale lyde.
- Brug ikke el-kørestolen, hvis bremsefunktionen ser ud til at være defekt.
- Brug ikke kørestolen, hvis dækkene er stærkt slidte eller beskadigede. Kontakt din forhandler eller en autoriseret serviceudbyder.
- Hvis du opdager skader på sikkerhedsselen, armlænet, sædet, ryglænet, joysticket eller andre dele af stolen, skal du kontakte dit servicecenter eller din forhandler.
- Hvis du opdager skader på det elektriske system (kabler, batterier, opladere osv.), skal du kontakte dit servicecenter eller din forhandler.

Producentens garanti

Eloflex-garantien dækker udskiftning af dele, der er gået i stykker, forudsat at skaden ikke er forårsaget af brugeren. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre omstændigheder som tyveri, misbrug, forkert brug, lynnedslag eller ændringer.

Forventet levetid

Den anslåede levetid for en Eloflex er 5 år. Produktets levetid påvirkes dog i høj grad af, hvordan det bruges og vedligeholdes. En Eloflex kan holde meget længere, hvis den bliver passet godt på og brugt i overensstemmelse med oplysningerne i dette dokument.

Sikkerhedsforskrifter og risici


Advarsel: Læs og forstå alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger i denne manual, før kørestolen tages i brug første gang.

UDFOLDNING OG FOLDNING

1. Placer den sammenklappede stol på jorden som vist nedenfor. Løsne transportlåsen som sitter

på baksiden. Hold ryggstøtten og dra den oppover for å åpne stolen. Med den andre hånden, trykk setet

nedover til du hører et tydelig "klikk", som indikerer at låsen er aktivert.

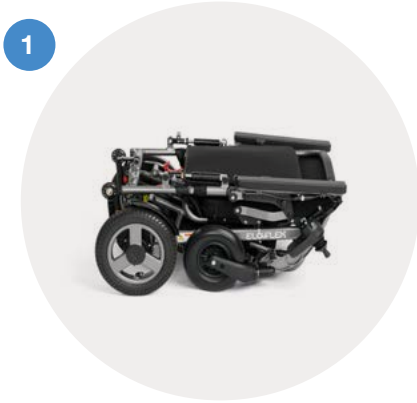

2. **Viktig!** Sørg for at låsen er helt lukket for at sikre stolen i utfoldet position.





Kontroller låsen før bruk.

-
1. Åbn låsen som vist på billedet.

2. Plasser den ene hånden på forsiden av seteputen. Ta tak i toppen av ryggstøtten med den andre hånden og brett den forover. Skyv stolen sammen som vist. **Klempunkter!** Vær forsiktig når du bretter sammen.

3. En praktisk transportlås kan kobles inn for å holde rullestolen i sammenfoldet stilling. Roter transportlåsen til den låser den motsatte stangen..

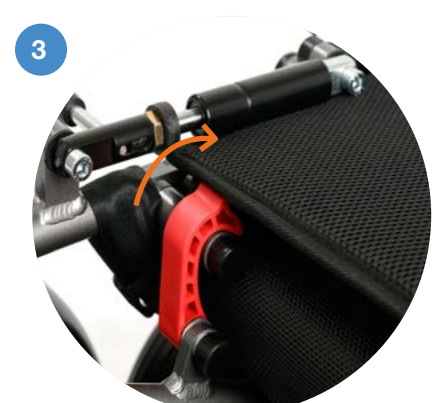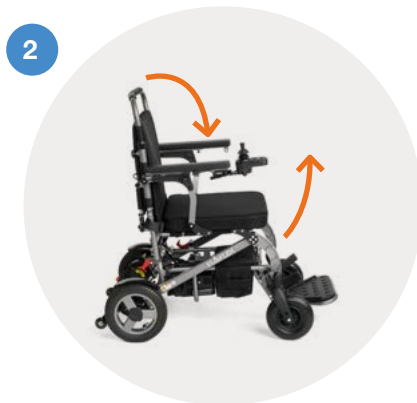

OPLADNING

Før du går i gang

- Oplad din Eloflex helt før første brug.
- Brug kun en original Eloflex-oplader, der er godkendt til denne model.
- Opladeren er kun beregnet til at blive tilsluttet joysticket, ikke direkte til batterierne.
- Oplad mindst hver 3. måned for at forhindre permanent skade på batteriet.

Sådan oplader du

Hvis kørestolen ikke skal bruges i en længere periode, skal batterierne genoplades mindst hver tredje måned for at undgå dybdeafledning og permanent skade på batterierne.

Start med at slukke for din Eloflex (alle lys på joysticket skal være slukket).

Tilslut opladeren til stikket på forsiden af joysticket. Sørg for, at kontakterne passer sammen.

Sæt opladerens strømkabel i en stikkontakt. Opladning indikeres af en lampe på opladeren. Et rødt lys betyder, at opladningen er i gang.

Efter ca. tre timer er batterierne 90 procent opladet, og stolen kan bruges.

Opladningstiden afhænger af batteriniveauet, batterikapaciteten, opladertypen og temperaturen. Som en generel tommelfingerregel er batterierne normalt tilstrækkeligt opladet til brug efter cirka 3 timer og fuldt opladet efter cirka 5-8 timer. Under opladningen bliver opladeren varm, hvilket er normalt.

Kobl altid opladeren fra både stikkontakten og kørestolen, når opladningen er færdig. Oplad ikke kørestolen et sted, hvor en eventuel opladningsfejl ikke kan opdages. Oplad ikke batterierne ved temperaturer under 0 °C.

Hvis kørestolen har været opbevaret i kolde omgivelser, skal batterierne have lov til at opnå stuetemperatur, før de oplades.

Hvis din Eloflex bruges i temperaturer under frysepunktet, påvirkes rækkevidden. Ved f.eks. -10 °C kan rækkevidden reduceres med op til 50 %.

Langvarig opbevaring

Batterierne kan tage permanent skade, hvis spændingen bliver for lav.

Vi anbefaler at frakoble batterierne for at minimere afladning og oplade dem regelmæssigt (mindst en gang hver 3. måned).

Lad aldrig opladeren være permanent tilsluttet.



Hvis batterierne ikke oplades regelmæssigt, vil de tage permanent skade.



MONTER JOYSTICKET

1. Monter joystick ved at samle hurtiglåsen på armlænet med låsen (A) vendt udad. Juster møtrikken (B), så låsen kan lukkes helt og sikkert holde joysticket på plads. Joysticket kan monteres på højre eller venstre

side med en adapter, der kan købes separat.

2. Sæt kabelstikkene sammen, og drej dem forsigtigt, indtil stifterne passer ind i hullerne, og rillerne i begge stik passer sammen. Skru derefter mufferne godt fast på hvert forbindelsespunkt.



Vær forsigtig, så du ikke beskadiger eller bøjer stifterne i stikket.

FOLDE JOYSTICKET NED

Det smarte joystickbeslag gør det muligt for brugeren hurtigt at sænke joysticket uden at fjerne det. Dette betyder, at du kommer tættere på bordkanten, hvilket giver en bedre siddestilling.

1. Løft låsearmen for at frigøre joysticket.
2. Træk joysticket forsigtigt fremad. Lad derefter joysticket hænge lodret ned.



BRUG AF JOYSTICKET

1. USB-stik

TIP: Brug USB-stikket under joysticket til at oplade din mobiltelefon.



2. Indgang til oplader

3. Batteriniveau

Angiver, hvor meget strøm der er tilbage i batterierne. Det anbefales at oplade, når tre søjler er brugt op.


4. Hastighedsmåler

Viser din aktuelle hastighed.

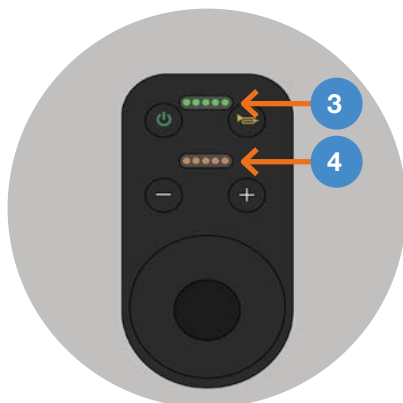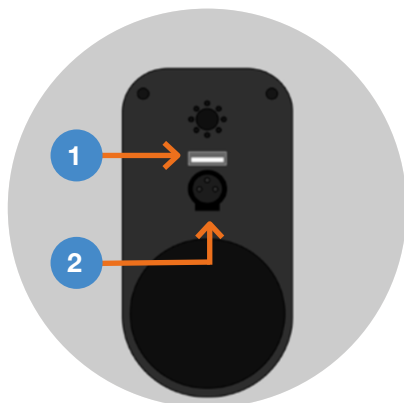


Joystick

Styrer stolens hastighed og retning.

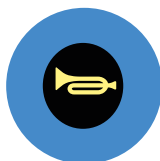


Horn

Tryk for at påkalde opmærksomhed.

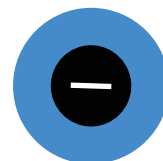


Sænk hastigheden:

Tryk for at få stolen til at køre langsommere.

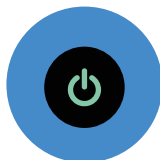

Tænd og sluk

Tryk for at tænde eller slukke for din Eloflex.

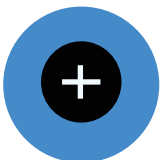



Øg hastigheden:

Tryk for at få stolen til at køre hurtigere.

FODSTØTTE

Fold fodstøtten op

For at lette ind- og udstigning kan fodstøtten foldes op og ind som vist nedenfor.

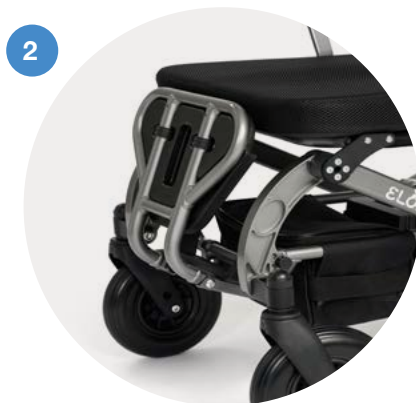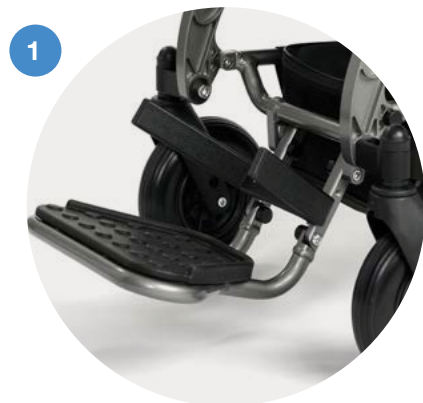

Påmindelse

Brug ikke fodstøtten som trin, når du sætter dig over i kørestolen, da det kan få kørestolen til at vælte eller beskadige fodstøtten.

Juster fodstøtten

Du kan justere højden på fodstøtten til to faste positioner.

1. Stram fastskruerne **(A)**, mens du holder møtrikken.

2. Fjern det sorte plastdæksel fra møtrikkerne.

3. Monter fodstøtten igen i det alternative monteringshul. Hvis fodstøtten ikke forbliver i hævet position, kan du justere spændingen ved at stramme fastskruerne **(B)**.



ARMLÆN

Løft armlænene

For at løfte armlænene, drej låseknoppen **(A)** opad. Løft derefter armlænene. På grund af risiko for skade, sørg for at trække armlænet ned og låse det igen før brug.



RYGLÆN


Vip ryglænet

For at ændre vinklen på ryglænet trinvist, tryk ned spakene på begge sider. Læn ryglænet til en behagelig position og slip derefter spakene for at låse det på plads



JUSTER RYGLÆNET

Træk ryglænet op for at folde det. Stram velcrobåndene for at opnå en behagelig siddestilling. Fold derefter ryglænet ned igen og tryk let for at fastgøre det til velcrobåndene.

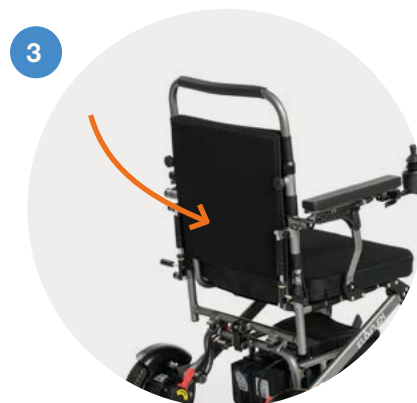

LÅSEMEKANISME

Det er vigtigt, at låsemekanismen på din Eloflex-stol bevæger sig med mærkbar modstand, når den justeres op eller ned. Modstanden skal være stærk nok til at holde mekanismen sikkert i opretstående position af sig selv. Dette er afgørende for at sikre, at låsen forbliver fastlåst, selv når fjedrene er under tryk. For at øge modstanden skal du blot stramme de to sekskantskruer på fastgørelseselementet, der holder låsemekanismen på plads.



Det er vigtigt, at låsemekanismen bevæger sig med modstand op og ned for at forhindre, at den åbner, når stolen er i brug.

TIPSIKRING

Tipsikringen skal ikke justeres, men kan trækkes tilbage under transport på nogle modeller. Kørestolen må ikke bruges, uden at tipsikringen er aktiv, da der er risiko for alvorlige skader. Kontrollér den før hver brug.



RISIKO FOR SKADER!
Sørg altid for at tippesikringen er aktiv.

MANUEL KØRSEL

Sluk for el-kørestolen med joysticket. Tryk derefter på de røde håndtag på motorerne (se billede) for at frakoble magnetbremserne. I denne position kan stolen rulles manuelt.

Vær opmærksom! Hvis brugeren anvender stolen uden hjælp, skal stolens magnetlås altid være slået til.



Skub ikke de røde håndtag med foden, brug kun hænderne.


SIKKERHEDSSELE

For sikker kørsel anbefaler vi altid at bruge sikkerhedssele, når stolen betjenes.



TRANSPORT OG OPBEVARING

- Når stolen skal løftes, anbefales det, at den først foldes sammen, så den ligger fladt, og derefter løftes op i lodret position, før den til sidst løftes.
- En sammenfoldet stol kan lægges i bagagerummet på en bil eller sættes ind i et klædeskab.
- Fold joysticket ned eller fjern det under transport.
- Hvis stolen ikke skal bruges i et stykke tid, skal den opbevares korrekt, og batterierne skal oplades med jævne mellemrum i henhold til kapitlet "Sådan oplades den". Ellers kan stolen blive ubrugelig.
- Stolen skal opbevares indendørs i frostfrie, tørre og ventilerede områder. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.
- Hyndebetræk er aftagelige og kan vaskes ved 60 °C.
- Ved transport med bus eller handicaptransport skal Eloflex fastgøres til de fastgørelsespunkter (1-4) der er vist på billederne nederst.
Bemærk venligst! Eloflex er ikke testet eller godkendt som autostol. Derfor er det ikke tilladt at sidde i Eloflex under biltransport.
- Ved flytransport bedes du kontakte dit flyselskab før både booking og check-in. Eloflex følger IATA's anbefalinger.
- Ved langtidsparkering eller opbevaring kan dæk i sjældne tilfælde efterlade mærker på følsomme gulvoverflader.
- Dette kan afhænge af gulvmateriale, overfladebehandling, rengøringsmidler, temperatur, fugtighed eller langvarig kontakt i samme position.
- Ved langtidsopbevaring anbefaler vi at bruge en beskyttelsesmåtte eller flytte kørestolen lejlighedsvis. Eloflex kan ikke garantere kompatibilitet med alle gulvtyper eller overfladebehandlinger.

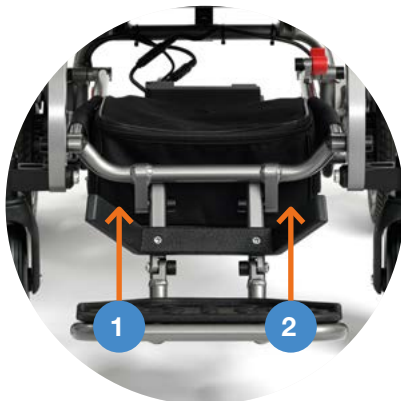

KØRSEL

Læs

Brugeren skal læse disse sikkerheds- og kørselsinstruktioner, før Eloflex el-kørestolen tages i brug.

Øvelse

Øvelse gør mester. Træn i at køre din Eloflex sammen med en hjælper ved at starte på en åben overflade, helst udendørs, før du bruger din el-kørestol blandt andre mennesker, i butikker eller restauranter osv. Kør fremad ved at bevæge joysticket langsomt fremad. Stop ved at slippe joysticket.

Kør baglæns

Bak ved at bevæge joysticket langsomt baglæns. Slip joysticket for at stoppe. Husk altid at kigge bagud, før du begynder at bakke, så du er sikker på, at der ikke er nogen personer eller ting i vejen.

Spinn

Drej ved at bevæge joysticket forsigtigt sidelæns. Pas på, at der ikke er noget i vejen for siderne, når du drejer.

Drej

Drej, mens du kører, ved forsigtigt at bevæge joysticket sidelæns i samme retning, som du vil dreje. Sænk altid hastigheden, når du drejer.

Forhindring

Øv dig i at undgå og passere forhindringer. Bevæg joysticket sidelæns, mens du kører fremad, for at undgå forhindringer. Husk at sænke hastigheden, når du nærmer dig en forhindring.

Hurtig kørsel

Hurtig kørsel: Tryk joysticket i fremadgående position, hvis du vil køre hurtigt. Husk at trække joysticket tilbage og sænke hastigheden, så snart du føler dig usikker, uanset om du drejer eller nærmer dig en forhindring

Kør over forhindringer

Kør langsomt hen til forhindringen, og sørg for, at forhjulene er i kørselsretningen. Bevæg derefter joysticket langsomt fremad, mens du læner dig bagud, for at køre over forhindringen Eloflex er testet og godkendt til forhindringer på op til 3,1 cm.

Skrånende overflader

Prøv at køre lige op eller ned ad en skrånende overflade. Læn dig lidt fremad, når du kører op, og bagud, når du kører ned, for at bevare tyngdepunktet. Undgå så vidt muligt at køre sidelæns, og kompensér for en eventuel sidehældning ved at læne dig i den modsatte retning. Kør altid langsomt på skråninger, og vær opmærksom på, at bremselængden kan være betydeligt større end på jævnt underlag. Den maksimalt tilladte hældningsvinkel for denne kørestol er 9 grader. Selv om din Eloflex er i stand til det, skal du undgå at køre på skråninger, der er større end den krævede testvinkel, på grund af risikoen for alvorlige skader i tilfælde af væltning.

Elevatorer

Husk at tjekke bredden på elevatordøren, og hvor hurtigt døren lukkes, før du går ind i elevatoren. Husk, at du kan blive nødt til at bakke ud af elevatoren, hvis den ikke er stor nok til, at du kan vende om.

Kørsel på vejen

Kør primært på fortove, gang- og cykelstier.

Kryds vejbanen

Hvis det er muligt, skal du altid vælge at krydse vejen ved en fodgængerovergang. Vær opmærksom på krydsende biler. Brug den affasede del af fortovet, hvis det er muligt. Undgå kantsten, der er højere end 3,1 cm.

Dæk

Hvis kørestolen er udstyret med luftfyldte dæk, skal du regelmæssigt kontrollere trykket ved 2,5 bar. I tilfælde af punktering skal du undlade at køre videre og kontakte din forhandler eller et egnet værksted for reparation.

Ved langtidsparkering eller opbevaring kan dæk i sjældne tilfælde efterlade mærker på følsomme gulvoverflader.

Dette kan afhænge af gulvmateriale, overfladebehandling, rengøringsmidler, temperatur, fugtighed eller langvarig kontakt i samme position.

Ved langtidsopbevaring anbefaler vi at bruge en beskyttelsesmåtte eller flytte kørestolen lejlighedsvis.

Eloflex kan ikke garantere kompatibilitet med alle gulvtyper eller overfladebehandlinger.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER VED KØRSEL

Der er risiko for alvorlig personskade, hvis kørestolen vælter.

- Kør kun på skråninger, der ikke overstiger den angivne maksimale vinkel.
- Brug altid tippesikring, når du kører med Eloflex.
- Kørsel ned ad bakke bør altid ske med lavere hastighed.
- Undgå områder, hvor der er risiko for isglatte eller glatte overflader.
- Forsøg aldrig at køre op eller ned ad trapper med din el-kørestol.
- Kør aldrig over forhindringer, der er højere end den anbefalede maksimale højde.
- Undgå hurtige bevægelser med joysticket og pludselige ændringer i kørselsretningen under kørslen.

Risiko for at sidde fast på afsidesliggende steder.

- En bruger med stærkt nedsat mobilitet bør ikke køre længere strækninger udendørs alene.

Risiko for skader, hvis den ene fod glider af fodstøtten og falder ind under el-kørestolen under kørsel.

- Placer altid fødderne midt på fodstøtten under kørsel.

Risiko for skader, hvis du kolliderer med andre genstande.

- Kør gennem smalle passager med lavest mulig hastighed og størst mulig opmærksomhed.
- Vær ekstra opmærksom, når du nærmer dig eller kører tæt på borde på grund af klemningsrisiko mellem bordpladen og joysticket og/eller armlænet.

Der er risiko for, at kørestolen vælter, hvis tippesikringerne fjernes, beskadiges eller monteres i en position, der afviger fra standardmonteringen.

- Tipsikringen skal altid være monteret, når el-kørestolen bruges.

- Tipsikringen virker kun på et fast underlag. På bløde overflader som f.eks. græsplæner og sne kan tippesikringen miste sin virkning. Kør derfor ekstremt forsigtigt på bløde overflader.

Kulfiber

For vores kulfibermodeller, bemærk følgende: Dette materiale har et fremragende styrke-til-vægt-forhold, hvilket muliggør den lave samlede vægt. Materialet er dog også mere sprødt end andre materialer såsom aluminium og har større tendens til at revne eller blive punkteret. Derfor skal et kulfiberprodukt generelt behandles mere forsigtigt end andre produkter, og dette gælder også for din Eloflex-kørestol.



SIKKERHED

Krydsning af jernbanespor

Kryds altid jernbanesporet lige forfra, aldrig skråt fra siden. Kryds aldrig jernbanesporet alene, hav altid nogen med dig, som kan hjælpe dig.

Skarpe kanter

Vær forsigtig, når du kører på stejle skråninger, da stolen sandsynligvis vil gå i stykker. Eloflex er testet og godkendt til hældninger på maks. 9 grader. Hav altid nogen med dig, som kan hjælpe dig.

Høje kanter

Vær forsigtig, når du kører op eller ud for en kant. Eloflex er testet og godkendt til kanter på op til 3,1 cm. Hav altid nogen med dig, som kan hjælpe dig.

Forflytning

Vi anbefaler, at du altid har en person, der kan hjælpe dig med forflytninger til og fra din Eloflex. Sluk altid for strømmen, før du starter forflytningen. Løft altid armlænene og fodstøtten op, før du forflytter dig, så det bliver lettere at komme ind og ud af stolen.

Reparer ikke selv

Forsøg aldrig selv at reparere en ødelagt el-kørestol. Hvis du selv forsøger at reparere stolen, gælder garantien ikke. Henvend dig altid til Eloflex eller til den butik eller det hjælpemiddelcenter, der har solgt/forordnet stolen. Modificer aldrig din el-

kørestol på egen hånd.

Intet legetøj

Lad aldrig børn, der ikke normalt bruger en el-kørestol, sidde på eller bruge din Eloflex.

Rengøring

Rengør aldrig din Eloflex med rindende vand. Tør den kun af med en fugtig klud. Hvis din Eloflex er langsom til at folde op og sammen, kan du smøre samlingerne med olie eller silikonespray.

Pas på varmen

Efterlad aldrig din Eloflex i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller åben ild. Batterierne kan blive beskadiget, og nogle overflader kan blive så varme, at der er risiko for skader. Du kan bruge din Eloflex fra -10 grader og op til +45 grader. Ved lave temperaturer vil rækkevidden blive påvirket. Kørestolen er antændelsesresistent i henhold til EN 12184.

Opbevaring

Opbevar din Eloflex uden for børns rækkevidde, når den ikke er i brug. Stolen skal opbevares indendørs i frostfrie, tørre og ventilerede områder. Opbevaringstemperatur 0-30°C.

Opladeren

Opladeren må aldrig være tildækket, når den bruges til at oplade din Eloflex. Opladeren bliver varm, og

der er risiko for ulykker eller skader.

Batterier

Opbevar aldrig batterierne i direkte sollys eller på et sted, hvor temperaturen kan komme under nul. Batterierne skal opbevares på et tørt og ventileret sted. I tilfælde af bortskaffelse skal batterierne genbruges i henhold til nationale/lokale krav. Bemærk, at som alle batteridrevne produkter vil rækkevidden falde med tiden, også i garantiperioden og i produktets levetid.

Anvendelse

Eloflex el-kørestol er designet til at opfylde en række forskellige behov. Beslutningen om, hvorvidt den er egnet til brugeren, træffes af koordinatoren eller forhandleren og brugeren i fællesskab. Eloflex kan ikke påtage sig ansvaret, hvis el-kørestolen ikke er korrekt tilpasset brugerens behov.

Ændringer

Din Eloflex skal primært bruges i sin standardkonfiguration. Eventuelle ændringer eller justeringer må kun udføres af dit autoriserede servicecenter eller af Eloflex. Vær opmærksom på, at skader eller funktionsfejl forårsaget af ændringer, der ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen, eller som skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse, ikke er dækket af garantien.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i dette dokument.

- Brug kun el-kørestolen i henhold til instruktionerne i denne manual (se ovenfor, kapitel "Typeklassificering og tilsigtet brug").
- Brug aldrig (sid aldrig i) kørestolen, mens den er under transport i en anden bil/bus.

Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen bruges ved nedsat køreevne.

- Brug ikke kørestolen, når dine køreegenskaber er nedsat på grund af f.eks. sygdom, medicin eller alkohol.

Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen ufrivilligt flyttes.

- Sluk for kørestolen før ind- og udstigning, eller hvis der er risiko for, at du, en anden person eller en genstand kan komme i kontakt med joysticket.
- Når motorene er koblet fra, virker bremsene ikke. Derfor må kørestolen kun skubbes på fladt terræn, aldrig på skråninger. Efterlad aldrig kørestolen på eller i nærheden af skråninger med udkoblede motorer.

Der er risiko for personskade, hvis el-kørestolen slukkes under kørsel med f.eks. tænd/sluk-knappen eller ved at rive et kabel af, da den stopper med et hårdt ryk.

- Slip joysticket, når du bremser i en nødsituation. Så stopper kørestolen automatisk.

Der er risiko for skader på grund af fald fra kørestolen

- Bevæg dig ikke fremad, bøj dig ikke forover mellem knæene, og læn dig ikke ud over kørestolens kant, f.eks. for at nå genstande.
- Det anbefales altid at bruge sikkerhedsselen og justere den før hver tur.
- Når du skifter mellem sæder/køretøjer, skal du køre så tæt på den nye position som muligt for at minimere afstanden og risikoen for at vælte kørestolen.

Der er risiko for personskade, hvis den maksimalt tilladte belastning overskrides.

- Overhold den maksimalt tilladte belastning (se kapitlet ""Tekniske data"" bagest i dette dokument).
- El-kørestolen må kun bruges af en enkelt person. Brug aldrig kørestolen til at transportere mere end én person ad gangen.

Der er risiko for personskade og beskadigelse af kørestolen, hvis låsen løsnes, når el-kørestolen ikke er korrekt fastspændt under brug.

- Hvis el-kørestolens lås ikke er klikket ordentligt på plads, kan stolen pludselig klappe sammen, når den bruges, hvilket kan medføre, at man falder ud af kørestolen.

- Sørg altid for, at låsekrogen er i korrekt position, før du bruger el-kørestolen.

- Der er risiko for personskade og knusningsskader, når kørestolen foldes sammen.

- El-kørestolen skal altid klappes sammen og hæves som beskrevet i brugsanvisningen.

- Vær opmærksom på, at ingen eller intet kommer i klemme, når du folder den sammen og ud.

Der er risiko for personskade og beskadigelse af kørestolen, hvis den bruges i fugtige områder.

- El-kørestolen må ikke bruges under hede.
- El-kørestolen må ikke bruges under badning.

- Undgå at køre i regnvejrlængere tid.

EMC

- Der er risiko for, at kørestolen kan forstyrre eller blive forstyrret af udstyr på grund af elektromagnetiske felter. Dette kan påvirke styringen af kørestolen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER L2

NETTOVÆGT Uden batterier	19,8 kg	MAKS. HÆLDNING Statisk / dynamisk	9° / 6°
SAMLET VÆGT Inkl. batterier	23,4 kg	MAKS. FORHINDRING	3,1 cm
HASTIGHED	6 km/h	HJUL 2,5 bar	8" for (massive) 10" bag (luft)
RÆKKEVIDDE	30 km*	SÆDE H x B x D	53 x 43 x 44-47 cm
VARIGHED Pr. opladning	5 h	MAKS. BRUGERVÆGT	120 kg
MOTOR	2 x børsteløs motor med høj effekt	JOYSTICK	Højre- eller venstremonteret
MOTOREFFEKT	2 x 200 W	PUDE	Aftagelig, aftageligt betræk
BATTERI +1 ekstra plads	2 x litium-ion 10 Ah / 24 V (240 Wh)	RYGLÆN	Justerbar vinkel 8–30°
BATTERIVÆGT	1,8 kg	MÅL H x B x D	97,3 x 59,2 x 95,5 cm
OPLADNINGSTID	3 h	MÅL SAMMENKLAPPET H x B x D	74 x 59,2 x 32 cm
VENDERADIUS	82,5 cm	GARANTI	2 år

* Afstand under optimale forhold og vil blive påvirket af temperatur, kørestil, højde og batteriets tilstand, osv. For længere rækkevidde og/eller højere brugervægt anbefaler vi at bruge tre batterier.

© Copyright Eloflex

Dette dokument indeholder ophavsretligt beskyttede oplysninger og må ikke kopieres eller gengives helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Eloflex. Eloflex påtager sig intet ansvar for eventuelle typografiske fejl i dette dokument og forbeholder sig ret til at foretage produktændringer.

Kontakt Eloflex

Hvis du har spørgsmål, brug for hjælp eller oplysninger om produkttilbagekaldelser eller sikkerhedsmeddelelser, bedes du kontakte dit hjælpecenter eller din lokale forhandler. Hvis det er nødvendigt, kan du finde produktets serienummer på et klistermærke på undersiden af kabinettet.

