

Så här sätter du på väskan:



1 Fäll ihop elrullstolen. Veckla ut väskan och håll flärpen mot dig. Stå på ryggstödsidan.



2 Trä väskan över stolen. Dra ner den halvvägs, tills du når framhjulen. Ställ dig på andra sidan.



3 Håll i framhjulet samtidigt som du drar väskan över framhjulets infästning på båda sidor.



4 Se till att framhjulen pekar framåt (se bilden). Dra sedan väskan hela vägen ner.



5 Skjut in flärpen under stolen. Stick sedan in den innanför stängen för stödhjulen.



6 Sträck ordentligt och fixera kardborrefästet. Det är viktigt att hela kardborrefästet låser