

Tips på hur du enklast lastar in Eloflex i bilen.

Nedan har vi sammanställt de vanligaste tillvägagångssätten baserat på information och tips från användare.

1. Lyfta in den. Det allra vanligaste sättet att lasta in en Eloflex är så klart att fälla ihop och sedan lyfta in den i bilen. Nedan presenterar vi två varianter som många använder sig av, och som ger minimal påverkan på ryggen tack vare att man använder benen i lyftet.

Variant 1:



Fäll ihop din Eloflex och ställ den med hjulen mot bilens bagageutrymme.



Böj dig över stolen och ta tag med båda händerna runt de böjda framhjulsrören.



Böj dina knän och luta dig bakåt. Ta hjälp av benmusklerna när du lyfter upp Eloflexen till bagageluckans kant.



Ställ bakhjulen på bilens kofångare eller på kanten på bagageluckan.



Tippa stolen framåt in i bagaget på bilen.

Variant 2:



Frikoppla din Eloflex. Fäll sedan ihop den och ställ den med ryggen mot bilens bagageutrymme.



Böj dig över stolen och ta tag med båda händerna runt armstödens infästningar.



Böj dina knän och luta dig bakåt. Ta hjälp av benmusklerna när du lyfter upp Eloflexens bakhjul upp till bagageluckans kant.



Ställ bakhjulen på bilens kofångare eller på kanten på bagageluckan. Härifrån kan du rulla in stolen i bagaget.



Byt grepp. Ta tag runt framhjulets infästningar och rulla sedan in din Eloflex i bagaget via bakhjulen.

2. Häva in den. Det kanske bästa sättet att lasta in en Eloflex är att utnyttja hävstångseffekten. På så sätt behöver du inte lyfta mer än en tredjedel av Eloflexens vikt. Denna teknik kräver dock att du har en kombibil och att bagageluckans kant inte är högre än 55 cm. Tekniken bygger också på att du har en Eloflex med låsta tippskydd.



Frikoppla din Eloflex. Ställ den med fotplattan mot bilens bagageutrymme.



Ta tag runt ryggstödet och tippa stolen kraftigt bakåt. Rulla stolen framåt med hjälp av tippskyddens hjul tills framhjulen är inne i bagaget.



Häv upp stolen på dess framhjul genom att lyfta i ryggstödet. Häng stolen halvvägs in i bagaget genom att vila batterilådan mot kofångaren.



Lossa läshaken på din Eloflex och fäll sedan ihop den in i bagaget genom att vika ryggstödet framåt.



Byt grepp. Ta tag runt tippskydden och skjut in din Eloflex i bagageutrymmet.

3. Med hjälp av ramp. En ramp av något slag är ett bra hjälpmedel för att lasta in en Eloflex i bilen. Det här sättet är extra effektivt för dig som inte orkar lyfta tungt. Du kan till och med köra upp din Eloflex för rampen i hopfällt läge med hjälp av stolens motorer.



Lägg ut rampen med rätt avstånd mellan de två sidorna.



Ställ stolen framför rampen med ryggen mot bilens bagage. Se till så att den inte är frikopplad. Kontrollera igen att avståndet mellan ramperna stämmer överens med bredden mellan bakhjulen. Fäll sedan ihop din Eloflex.



Lyft stolen i framkant så att den står på bakhjulen. Du kan nu försiktigt backa upp din Eloflex för rampen med hjälp av joysticken. Använd lägsta hastighet och kör försiktigt.



När du kommit över bagageutrymmeskanten kan du stänga av joysticken och skjuta in stolen sista biten.



Användaren på bilden har köpt sina ramper på Jula. De är sedan modifierade genom att de kapats på mitten och ett gångjärn har monterats. Detta för att de skall gå att fälla ihop och därmed ta mindre plats i bagageutrymmet.