



- 1** Öppna kartongen, tag ur den övre frigoliten. Läg kartongen ner. Rulla ut din Eloflex ur kartongen (se bilden).



- 2** Avlägsna påsen och skyddsplasten. Återvinn den via plastavfall.



- 3** Fäll upp din Eloflex genom att dra ryggstödet uppåt och bakåt. Lås haken under ryggstödet (se bruksanvisningen).



- 4** Montera den lösa kabeln på valfri ledig kontakt på batteriet. Skruva åt låsringen ordentligt på kontakten.



- 5** Klipp bort transportskyddet på båda sidor med en sax.




- 6** Avlägsna transportskydden på den bakre bågen ovanför motorerna genom att klippa buntbanden med en avbitare.



7 Ta fram joysticken ur packväskan under sitsen.




8 Montera joysticken på valfri sida. Dra åt fästskruven så att joysticken inte kan röra sig.

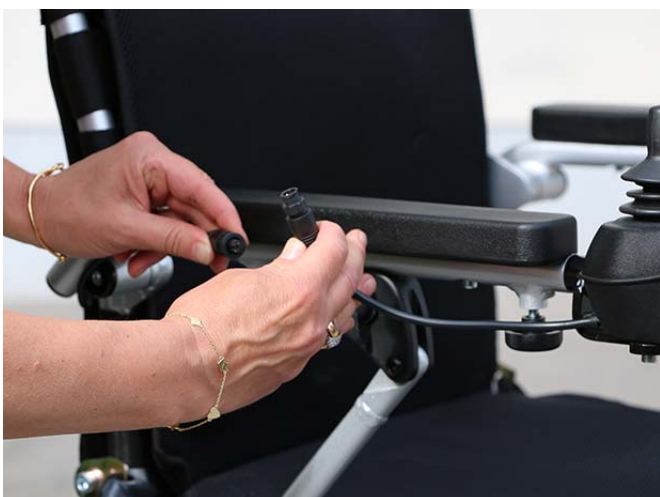

9 Sätt försiktigt ihop kontaktarna på joystickkabeln efter att ha kontrollerat styrspåren. Böj inte stiften! Skruva ihop kontaktens låsringar.



10 Pumpa bakhjulen på modellerna L-Plus och M-Plus till 2 kg lufttryck.

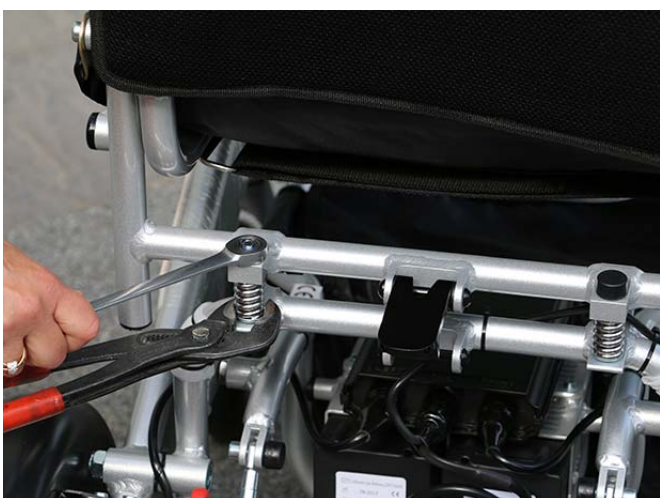

11 Om låshaken upplevs som trög eller svår att öppna/stänga kan den justeras genom att de två fjädrarna dras åt. Se bild.



12 Fotplattans tröghet kan enkelt justeras genom att de två fästskruvarna dras åt eller släpps. Du kan därefter låsa muttern med loctite. Se bild.